

NOTICE D'UTILISATION : TABLE DE LIT SIA DOUBLE PLATEAU

REF 264109

La table de lit (réf. 264109) est équipée de 2 plateaux réglables en hauteur et inclinables, couleur hêtre, dont un grand plateau avec rebord, avec piètement à roulettes munies de freins. Son assemblage ne nécessite aucun outil hors ceux fournis. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :

- Dimension grand plateau : 60 x 40 cm
- Dimension petit plateau : 40 x 20 cm
- Dimension piètement : 60,5 x 40 cm
- Hauteur maximale : 71 – 105 cm
- Matière : piètement métal époxy, colonne chromée, plateau mélaminé hêtre
- Poids : 8,8 kg
- Poids maximum supporté : 15 kg

Liste des pièces :

- Grand plateau et petit plateau
- Armature pied époxy
- Armature chromée support plateau
- 4 roulettes dont 2 à frein
- 4 vis, 4 rondelles, 1 clé plate et une clé alène

Instruction d'assemblage :

- Monter les deux axes des roulettes (1) et les roulettes sur l'armature de la table (2).
- Serrer avec la clé fournie.
- Visser le petit plateau (4) sur l'équerre de support (4 vis + 4 rondelles) en utilisant la clé Allen fournie.
- Emboîter le tube rond dans le cylindre du grand plateau (3) et serrer avec la molette.
- Emboîter le support des plateaux dans le pied à roulette.

Recommandations :

- Avant de poser un ou plusieurs éléments sur les plateaux, vérifier leur stabilité.
- Ne pas s'appuyer brusquement sur le bord du plateau.
- La table ne peut être utilisée pour une charge supérieure à 15 kg.

Entretien régulier :

- Essuyer immédiatement tout liquide renversé sur le plateau pour éviter sa déformation.
- Eliminer systématiquement les salissures avec une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

Conditions de garantie :

Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromedis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.

